


GUIA DE DESMONTAJE

# Instrucciones de mover


TODOS TIPOS DE BASES

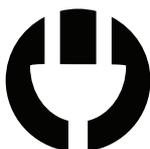


ELECTRICO



ARTICULACION

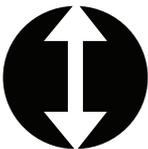

ALTO-BAJO

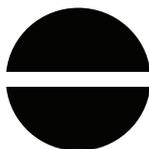


FIJO




MANUAL


*Esta guía describe las instrucciones básicas para desmontar y mover las camas de SleepSafe®.*

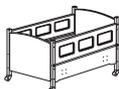

**SleepSafe® (BASICO)**

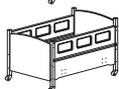

**SleepSafe® (Cama Baja)**

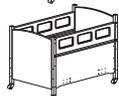

**SleepSafe® II (Cama Mediana)**



**SleepSafer® (Cama Alta)**

· de Doble Vista



**SleepSafer® Cama Extendida**

· de Doble Vista · con Extensión Encima



**SleepSafeBed.com | 866.852.2337**

3629 Reed Creek Drive | Bassett, VA 24055 | FDA Registered

# Tabla de Contenidos

- 1 Información para desmontar
- 2-3 Guía de Desmontaje: SleepSafe BASICO  
Cama Baja; SleepSafe II Cama Mediana
- 4-5 Guía de Desmontaje: SleepSafer Cama  
Alta y SleepSafer Cama Alta con Doble Vista
- 6 Guía de Desmontaje: Cama extendida/capa
- 7 Instrucciones del ajuste de las barandas
- 8 Preguntas Más Frecuentes/Mantenimiento
- 9 Proveedor DME / Apoyo Técnico

**¿SE NECESITAN LOS SIGUIENTES  
MATERIALES PARA PREPARARSE  
PARA LA MUDANZA?**

- **Levantamientos de Cartón**
- **Kit de Herramientas**

**¡DISPONIBLES PARA LA  
COMPRA! LLAME EL  
SERVICIO AL CLIENTE:  
866.852.2337**

*Esta guía está disponible como un PDF.  
Contacte el Servicio al Cliente al 866.852.2337  
para más información.*



TODAS BASES

## Las herramientas necesarias para desmontar



Llave Allen de 4mm,  
Llave Dinamométrica de T10 con  
broca cuadrada, y Llave Allen  
de 1/4" (Incluidas con el kit)



Destornillador de cabeza plana y  
de estrella



Llave Inglesa de 3/8"



Dos personas para Desmontar

# ¡Ojo! Lea antes de Desmontar

- **CONSERVE ESTA GUIA DE DESMONTAR.** PUEDE SER UTIL PARA LAS MUDANZAS DEL FUTURO.  
-----
  - **HAGA PLANES CUIDADOSOS DEL DESMONTAJE. FAMILIARICESE CON LOS COMPONENTES DE LA CAMA EN ESTA GUIA.**  
-----
  - **DURANTE EL DESMONTAJE, MANTENGA EL HARDWARE TODO JUNTO EN UNA BOLSA SEPARADA. SE PUEDE ENCONTRAR LA LISTA DE HARDWARE EN LA GUIA DE MONTAJE ORIGINAL.**  
-----
  - **USE LOS CUATRO LEVANTAMIENTOS DE CARTON DEL EMBALAJE ORIGINAL, O CUATRO SOPORTES SEMEJANTES, PARA EL DESMONTAJE.**  
-----
  - **DEBIDO A LA PRESENCIA DE PIEZAS PEQUENAS DURANTE EL DESMONTAJE, GUARDE LAS PIEZAS LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NINOS PEQUENOS.**  
-----
  - **IMPORTANTE: SIGA LAS INSTRUCCIONES SEGUN EL ORDEN ESPECIFICADO PARA ASEGURAR QUE LA CAMA HA SIDO DESMONTADO CORRECTAMENTE.**  
-----
  - **COMPLETE EL REENSAMBLAJE. ASEGURESE QUE SE INSTALA CADA COMPONENTE. NO OMITA NINGUN COMPONENTE DE LA INSTALACION.**  
-----
  - **NO USE NUNCA ESTA CAMA SI HAYA SUJETADORES FALTANTES, JUNTAS AFLOJADAS, PIEZAS ROTAS, MALLA RASGADA, O ACOLCHONADO INADECUADO. CONTACTE SLEEPSAFE BEDS AL 866.852.2337 PARA AYUDA.**
- **NUNCA SUSTITUYA NI MODIFIQUE LAS PARTES.** EL PRODUCTO INCLUYENDO LAS BARANDAS DE SEGURIDAD, DEBEN ESTAR INSTALADOS COMPLETAMENTE ANTES DE USARLOS.  
-----
  - **SI LA CAMA ESTA ALCOCHADA, AVERIGUE QUE LA ALCOCHADA DEBE QUEDAR BIEN SUJETAS.**  
-----
  - **NO USE HERRAMIENTAS ELECTRICAS DURANTE EL MONTAJE O EL DESMONTAJE.**  
-----
  - **ADVERTENCIA - PELIGRO DE ESTRANGULACION: ¡LAS CUERDAS PUEDEN CAUSAR ESTRANGULACION! NUNCA COLOQUE LA CAMA CERCA DE UNA VENTANA DONDE LAS CUERDAS DE LAS CORTINAS PUEDEN ESTRANGULAR A UN NINO.**  
-----
  - **MANTENGA LA CUERDA DEL CONTROL REMOTO FUERA DE LA CAMA MIENTRAS QUE MUEVA ARRIBA O ABAJO LA BARANDA DE SEGURIDAD DE MODO QUE NO QUEDEN APRISIONADOS LOS CABLES.**  
-----
  - **MANTENGA LA CUERDA DEL CONTROL REMOTO FUERA DEL INTERIOR DE LA CAMA PARA PREVENIR EL ENTRAPAMIENTO O EL ESTRANGULAMIENTO.**  
-----
  - **UN SISTEMA SAI (UNIDAD DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA) ES RECOMENDADO POR EL CONTROL DE LA MISION CRITICA POR EL USUARIO.**  
-----
  - **NO SUSTITUYA EL COLCHON. ESTA DISENADO E INSTALADO ESPECIFICAMENTE POR LA CAMA SLEEPSAFE® Y SU USUARIO**



**SleepSafeBed.com | 866.852.2337**


3629 Reed Creek Drive | Bassett, VA 24055 | FDA Registered

# Guía de Desmontaje

- ✓ SleepSafe (BASICO & Bajo)
- ✓ SleepSafe II (Cama Mediana)

## 1 Remueva las barandas de seguridad y el colchón.

Cuando las barandas de seguridad están en la posición baja, use ambas manos para remover las barandas de seguridad de los strikes.

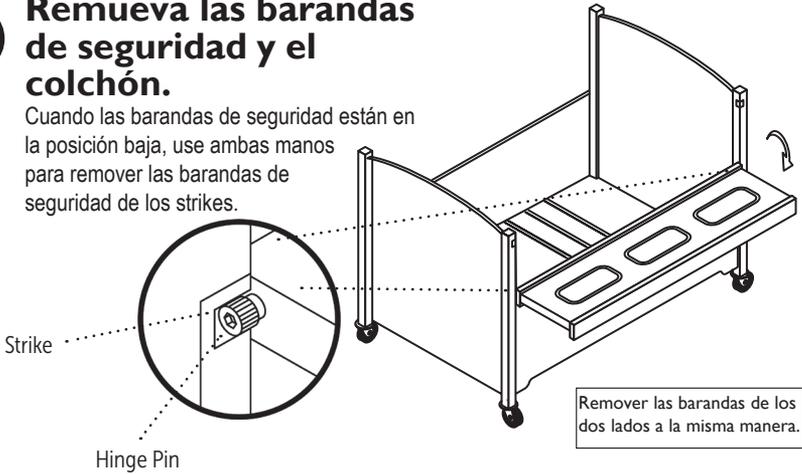


## 2 Use los Levantamientos de Cartón debajo de la fundación para elevar la cama.

Si no están disponibles, use artículos semejantes para levantar la cama uniformemente.

### Separe la cabecera y el pie de la cama.

(Use Llave Allen de 4mm para ajustar los tornillos Allen de 90mm a los paneles laterales.)

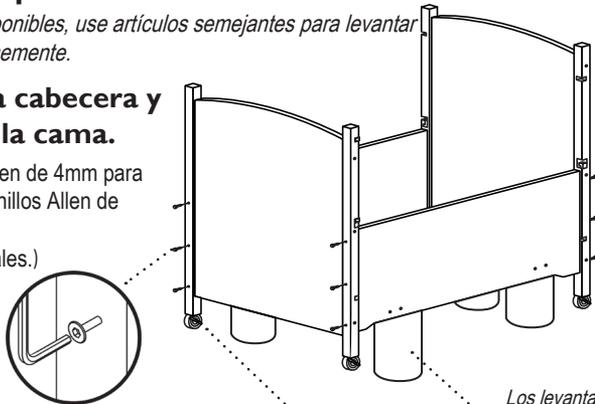

SleepSafe Bed (Cama Baja) usa (8) pernos de 90mm  
SleepSafe II (Cama Mediana) usa (12) pernos de 90mm

Los levantamientos de cartón u otros objetos semejantes están debajo de la base en cuatro áreas.  
Se puede quedar o quitar la ruedas durante la mudanza.



TODAS BASES



SleepSafeBed.com



1-866-852-2337

3629 Reed Creek Dr. | Bassett, VA 24055

**3**

### Separe los paneles laterales de la base.

(Use una llave de 3/8" para remover los ocho pernos hexagonales de 3/4" desde el panel interior)

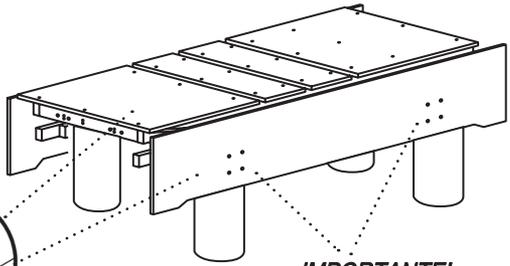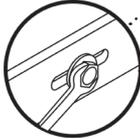

Encontrarás cuatro pernos hexagonales dentro de cada panel lateral.



### ¡IMPORTANTE!

Recuerda el ajuste de profundidad por la altura del colchón hasta el suelo cuando reinstala la cama. El ajuste alto aumenta la altura.

**4**

### Asegúrese que todos los tornillos mantienen en su lugar en los paneles laterales.

Los tornillos deben estar alineados tal como aparecen. Use un destornillador de cabeza plana para alinear si sea necesario.

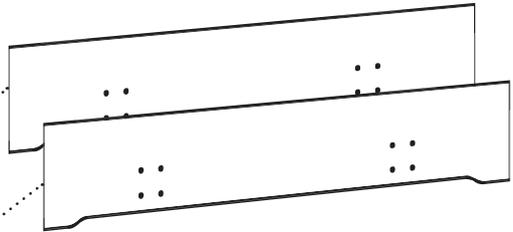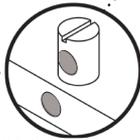


*SleepSafe Bed (Cama Baja) usa (8) tornillos  
SleepSafe II (Cama Mediana) usa (12) tornillos*

**5**

### Remueva la Base de los levantamientos.

### Prepare todos componentes para mover.

Para embalar, asegúrese que están protegidos la mecánica, el cableado, y los electrónicos debajo de la base.

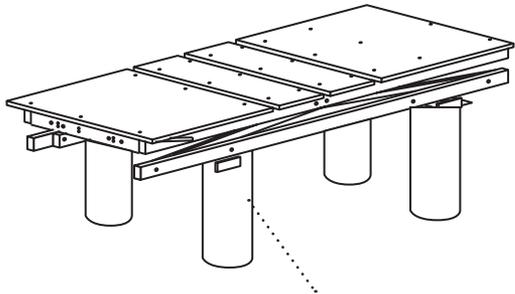

*¡Remueva y guarde los levantamientos de cartón para usar en el futuro!*

Antes de embalar, asegurar que todos contenidos están incluidos.


# Guía de Desmontaje

- ✓ SleepSafer (Cama Alta)
- ✓ SleepSafer (Doble Vista)


## 1 Remueva el colchón y las barandas de seguridad

Remueva los Cuatro Barandas de la opción DOBLE VISTA.

Strike

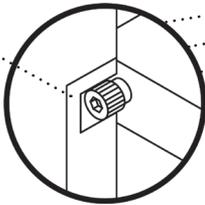

Hinge Pin

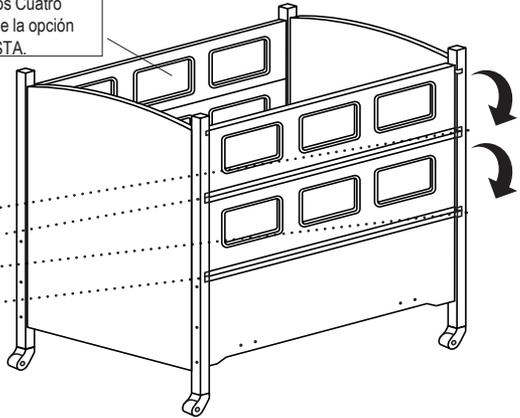



Cuando las barandas de seguridad están en la posición baja, use ambas manos para remover las barandas de seguridad de los strikes.

**Use los Levantamientos de Cartón debajo de la fundación para elevar la cama.** Si no están disponibles, use artículos semejantes para levantar la cama uniformemente.

## 2 Quite el panel trasero.

Remueva (2) tornillos de Allen de 90mm de cada poste, entonces remueva cuidadosamente el panel de las clavijas de alineación.


**ANOTE** que este paso no es necesario con las camas de Doble Vista.

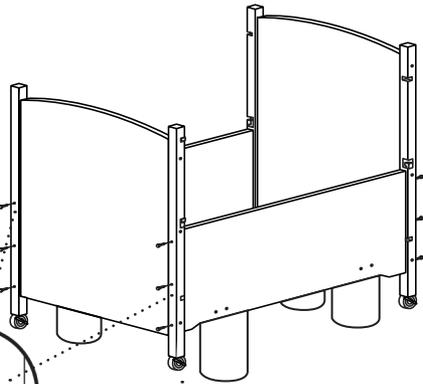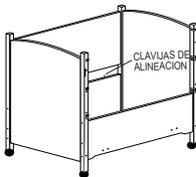

Las ruedas están preinstaladas

## 3 Separe la cabecera y el pie de la cama.



Remueva (6) tornillos de Allen de 90mm de cada panel con una llave de Allen de 4mm.

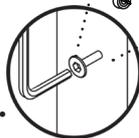

**IMPORTANTE:** Cuando reinstale el Panel Trasero los tornillos tienen que estar en la dirección contraria al somier, hacia la pared.

### 3 Separe los paneles laterales de la base.

(Use una llave de 3/8" para remover los ocho pernos hexagonales de 3/4" desde el panel interior)

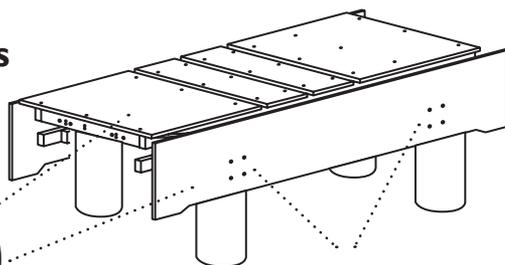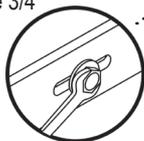



Encontrarás cuatro pernos hexagonales dentro de cada panel lateral.

#### ¡IMPORTANTE!

Recuerda el ajuste de profundidad por la altura del colchón hasta el suelo cuando reinstala la cama. El ajuste alto aumenta la altura.

### 4 Asegúrese que todos los tornillos mantienen en su lugar en los paneles laterales.

Los tornillos deben estar alineados tal como aparecen. Use un destornillador de cabeza plana para alinear si sea necesario.

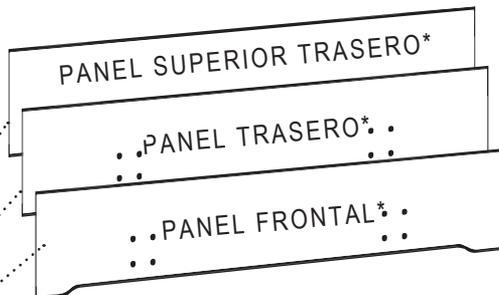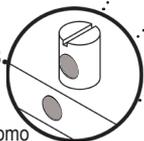


La Cama SleepSafer (Cama Alta) Los Paneles Traseros usan 10 tornillos. SleepSafer Bed (Cama Alta) El Panel Frontal usa 6 tornillos.

\* La Opción de Doble Vista sólo usa 2 paneles frontales. No hay Paneles Traseros.

### 5 Remueva la Base de los levantamientos.

#### Prepare todos componentes para mover.

Para embalar, asegúrese que están protegidos la mecánica, el cableado, y los electrónicos debajo de la base.

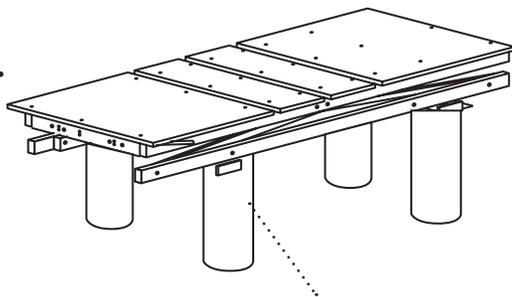

¡Remueva y guarde los levantamientos de cartón para usar en el futuro!

Antes de embalar, asegurar que todos contenidos están incluidos.

# Guía de Desmontaje

✓ **SleepSafer Cama de Extensión**  
**Extensiones abiertas y cerradas**  
(Antes de Desmontar SleepSafer)

## 1 Si Aplica, Remueva los Tornillos que aseguran la parte superior a la Extensión.

Para separar y remover la Capa de Extensión, usa una Llave Allen de 4mm para remover los (12) tornillos de Allen de 40mm.




## 2 Remueva los Tornillos que aseguran la Extensión a la cama.

Use una Llave Allen de 4mm para remover (1) tornillo de Allen de 90mm de cada poste de la cama para separar la Extensión.



## 3 Aflojen los tornillos superiores de los 4 postes de la cama.


Le permite ajustar el bastidor para remover la Extensión fácilmente.

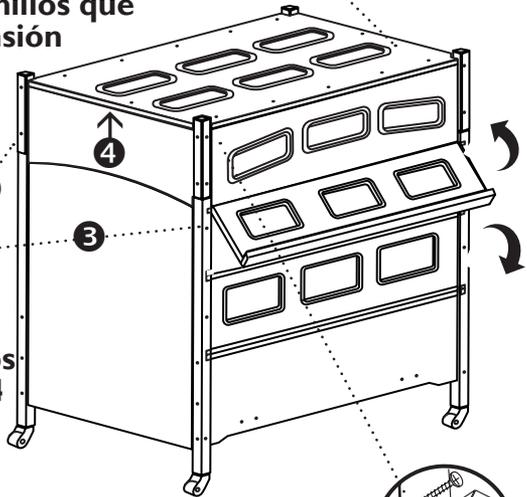

## 4 Remueva la Extensión.



Colocarla uniformemente en el suelo para continuar a desmontarla..

Remover el gatillo de seguridad de la Extensión e instalarlo correctamente cuando la cama está trasladada.

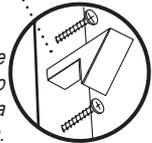

## 5 Separe los extremos de la Extensión de las barandas laterales.

Use una Llave Allen de 4mm para remover (8) tornillos de 90mm, 2 por poste, en cada lado del montaje.

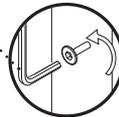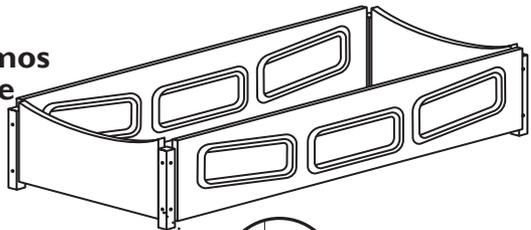

TODAS BASES



**SleepSafeBed.com**  
**1-866-852-2337**

3629 Reed Creek Dr. | Bassett, VA 24055


# Ajusto de las Barandas: Arriba y Abajo

## 1 ¿Se necesita ajustar la baranda de seguridad?

Para funcionar correctamente, el pin debe estar centrado en el strike.

Si no está centrado, siga estos pasos para centrar el pin.

**Herramientas Adicionales Necesarias:** Martillo o Mazo, Llave Torx T10 (Cabeza Cuadrada)

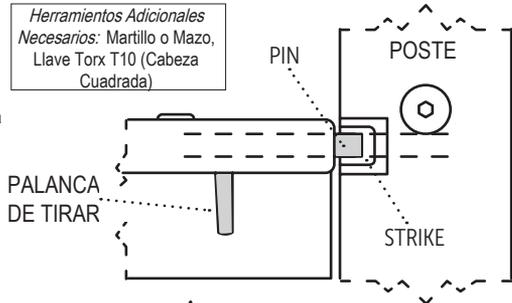


## 2 Remover el Strike del Poste de la Cama.

Usa una Llave Torx T10 para remover los tornillos del Strike. Golpea suavemente el strike del poste de la cama con un martillo o un mazo para tener acceso.

## 3 Ajustar el Tornillo de Ajuste.

Use una llave Torx 10 para ajustar el tornillo de ajuste. Se debe tener en cuenta la dirección que se necesita ajustar el pin. Si se necesita levantar el pin, gire el tornillo de ajuste hacia la derecha. Si se necesita bajarlo, gire el tornillo a la izquierda.

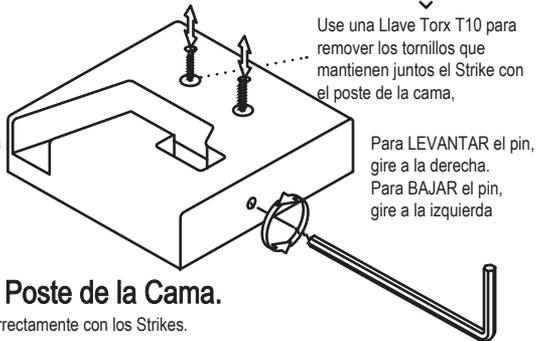

Use una Llave Torx T10 para remover los tornillos que mantienen juntos el Strike con el poste de la cama,

Para LEVANTAR el pin, gire a la derecha.  
Para BAJAR el pin, gire a la izquierda


## 4 Reinsertar el Strike en el Poste de la Cama.

Averiguar que los Pins están centrados correctamente con los Strikes.

# Ajustar las barandas de seguridad: Lado a Lado


## 1 ¿Se necesita ajustar la baranda de seguridad?

Mientras arriba y asegurado, averiguar que el espacio es igual entre los extremos de las barandas y las patas del cabecero y el piecero.

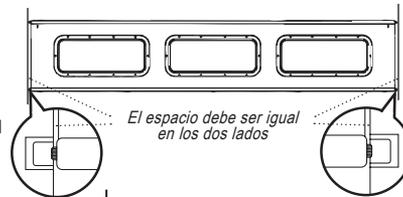

## 2 Remover la Baranda de Seguridad y ajustarla.

Si los espacios en ambos extremos de la baranada no son iguales, o hay demasiado movimiento de lado a lado, gire el tornillo hex negro usando la Llave Allen de 1/4" proveída.

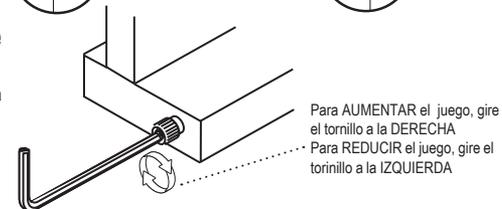

Para AUMENTAR el juego, gire el tornillo a la DERECHA  
Para REDUCIR el juego, gire el tornillo a la IZQUIERDA

Antes de embalar, asegurar que todos contenidos están incluidos.

# Preguntas Más Frecuentes

## ***¿Cómo puedo obtener piezas de repuesto? ¿Qué debo hacer si tengo un problema de reparación?***

Favor de llamar al proveedor de Equipo Médico Duradero (DME), quien ayudó a comprar la cama. Ellos pueden ayudar con cualquier problema que tiene usted. Si el proveedor DME no puede ayudarlo con las piezas de repuesto o la reparación, favor de llamarnos directamente al 866-852-2337 para que podamos ayudar.

## ***Hay un sistema de respaldo de batería para las camas que usa electricidad en caso de un fallo de corriente?***

Sí. Los sistemas de respaldo de batería típicamente están disponibles en las tiendas de material de oficina. Recomendamos que compre un respaldo de batería UPS o una unidad como ES 750 de APC. Esta unidad le proveerá con suficiente poder para operar la cama por un tiempo limitado. Esta unidad tiene 6 enchufes que funcionan con batería para proveer poder a otros aparatos eléctricos también.

## ***Las necesidades médicas de mi hijo han cambiado. ¿Puedo cambiar la fundación?***

Sí. La mayoría de las fundaciones de las Camas SleepSafe® pueden ser convertidas a otra. Para convertir una fundación de una Cama SleepSafe, se necesitará un kit de conversión de SleepSafe® Beds. El seguro médico puede o no puede cubrir el costo adicional del kit de conversión. Es posible que sea necesario entregar otra carta de necesidad médica que justifica el cambio. Se necesitará comprar el kit de conversión de su proveedor local de equipo médico duradero de SleepSafe® Beds. Llámenos al 866-852-2337 para más información sobre las conversiones de SleepSafe®. Estaremos encantados de ayudarle.

## ***¿Puedo compara sólo el colchón?***

Sí, se puede comprar un colchón de reemplazo para su Cama SleepSafe®. No recomendamos usar un colchón de SleepSafe® por otro tipo de cama. Nuestros colchones están diseñados y son el tamaño perfecto para una Cama SleepSafe®. Puede ser que no sea apropiada para otras camas. La seguridad es nuestra prioridad principal y nuestros colchones están diseñados para caber perfectamente, sin espacios, para reducir la posibilidad de excavar o atrapar.

## ***¿Cómo debo limpiar mi Cama SleepSafe®?***

Todas las superficies de una Cama SleepSafe® pueden estar limpiadas con agua y detergente suave usando un paño suave. Favor de evitar los abrasivos y los solventes.

# Lista de Mantenimiento Anual

- Apretar todos los tornillos en los paneles y los postes.***  
*Use las llaves proveídas de Torx y Allen para apretar a mano. Evite las herramientas eléctricas.*
- Lubricar los componentes de trabajo debajo de la cama.***  
*Lubrique los clavos, actuadores y bisagras.*
- Limpiar los Rellenos y Revisar el Velcro® si la cama está rellena***  
*Use un detergente suave para limpiar las superficies suavemente, evite esponjas o almohadillas de limpieza abrasivas. Verifique que el Velcro® está adjuntado correctamente.*

## Proveedor de Equipo Médico Duradero (DME)

# Serie de la Cama \_\_\_\_\_

Fecha de Instalación \_\_\_\_\_

Proveedor de DME \_\_\_\_\_

Contacto de DME \_\_\_\_\_

Dirección de DME \_\_\_\_\_

Teléfono de DME \_\_\_\_\_

Email de DME \_\_\_\_\_

Instalado por \_\_\_\_\_

## Servicio al Cliente & Apoyo Técnico

### Apoyo de SleepSafe Bed

Horas: 8 AM a 5 PM / L-V / EST

Línea Gratuita: 866.852.2337

Local: 276.627.0088

Fax: 276.627.0234

Sitio Web: [SleepSafeBed.com](http://SleepSafeBed.com)

*En caso de EMERGENCIA tras horas, favor de llamar 866-852-2337 para instrucciones de llamar el técnico de guardia.*

### Apoyo del Proveedor DME

DME: \_\_\_\_\_

Contacto: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_

Sitio Web: \_\_\_\_\_



**SleepSafeBed.com | 866.852.2337**

3629 Reed Creek Drive | Bassett, VA 24055 | FDA Registered | 820.120-15 Rev. 01