

¡IMPORTANTE! Si su cama no está operando correctamente, tal vez necesite resetearla con el control remoto.

Reiniciando su Cama SleepSafe®



Reiniciando una Cama TWIN SleepSafe®

1. Localice el botón de flecha HACIA ABAJO para la función Alta-Baja del control remoto.
2. Presione el botón hasta que escuche a la cama hacer click una vez, y continúe presionando el botón por 6 a 8 segundos hasta que escuche a la cama hacer click por segunda ocasión.



Reiniciando una Cama FULL o QUEEN SleepSafe®

1. Localice el botón de flecha ARRIBA y ABAJO para la función Alta-Baja del control remoto.
2. Presione ambos botones al mismo tiempo hasta que escuche a la cama hacer click una sola vez.

Estos procedimientos deberían restablecer la caja de control T-MOTION®. Si su cama no funciona, llámenos para obtener asistencia técnica.



SleepSafeBed.com / 866-852-2337

Hecho en USA